


Voyants
d'alarme sur le
panneau avant

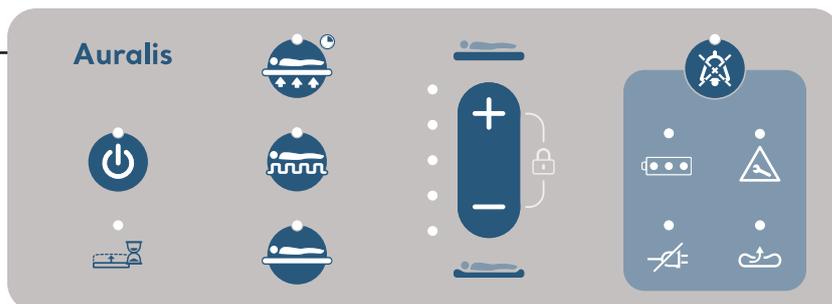

Bouton Marche/Veille

Mode Marche - appuyer une fois sur le bouton. Le voyant passe du clignotement à la lumière fixe.

Mode Veille - appuyer sur le bouton pendant deux secondes. Le voyant passe de la lumière fixe au clignotement.



Voyant d'attente

S'allume quand le matelas ou le coussin de siège est gonflé. Reste allumé pendant 15 minutes jusqu'à ce que le matelas ou le coussin de siège soit complètement gonflé.



Bouton du mode AutoFirm

Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant deux secondes pour définir le mode AutoFirm. Le matelas se gonfle sur une surface ferme temporaire. Le mode AutoFirm dure 15 minutes mais peut être augmenté jusqu'à 30 minutes maximum par paliers de 5 minutes. Le voyant est allumé lorsqu'il est actif.

Pas pour le coussin de siège.



Bouton du mode alternatif

Appuyer pour passer en mode Alternatif (par défaut). Le mode Alternatif gonfle ou dégonfle différentes cellules pour créer une surface fluctuante. Le voyant est allumé lorsqu'il est actif.



Bouton du mode Réactif BPC (basse pression continue)

Appuyer pour passer en mode Réactif BPC Permet de maintenir une base pression constante dans toutes les cellules. Le voyant est allumé lorsqu'il est actif.

Pas pour le coussin de siège.



Risque de blessure ou d'inconfort

TOUJOURS régler le niveau de confort au maximum pour les patients pesant plus de 360 kg (793 lb) (Auralis Plus uniquement)

Boutons de contrôle du confort

Appuyer pour ajuster la pression dans la surface thérapeutique afin de régler le niveau de confort. Les voyants indiquent le niveau de confort.



Bouton d'interruption de l'alarme

Appuyer sur cette touche pour neutraliser l'alarme sonore pendant 15 minutes, le voyant est allumé.

L'alarme s'arrête lorsque le problème qui l'a déclenchée a été résolu.



Voyant de batterie déchargée

Voyant jaune et alarme sonore – 1 heure d'autonomie restante. L'alarme peut être coupée.

Lorsqu'il reste moins de 15 minutes d'autonomie de la batterie, la pompe bascule en mode Réactif BPC. L'alarme sonore ne peut plus être neutralisée.



Voyants de charge de la batterie

Les voyants bleus indiquent le niveau de charge de la batterie. Voyant clignotant – la batterie est en charge.



Voyant de maintenance

- Voyant de service jaune, voyants d'alarme du panneau avant verts – la pompe est prête pour le service. Il s'agit uniquement d'une information, pas d'une alarme.
- Voyant de service jaune, voyants d'alarme du panneau avant jaunes, alarme sonore – la pompe présente un défaut ou une erreur interne. L'alarme peut être coupée.



Voyant de défaillance de l'alimentation principale

Une panne de courant a été détectée. Pour information uniquement, la pompe continue de fonctionner normalement en utilisant la batterie. Il n'y a pas d'alarme sonore.



Voyant de pression faible

- Le voyant s'allume, il y a un seul signal d'avertissement – la pompe détecte une basse pression dans le matelas ou le coussin de siège.
- Le voyant s'allume, il y a une alarme sonore – le matelas ou le coussin de siège est déconnecté pendant l'utilisation. L'alarme peut être coupée.
- Le voyant s'allume, il y a une seule tonalité d'avertissement – la pompe détecte qu'un matelas n'est pas connecté au démarrage.